
Pro použití s ADAMS™ A_{1C} CALIBRATOR 80

Určení použití

Kalibrace přístroje ADAMS™ A_{1C} series.

Výstrahy a upozornění

Zacházejte s tímto produktem a vzorkem jako biologicky nebezpečnou látkou.

Varování:

Tento produkt je vytvořený s lidskou krví, která byla testována a shledána negativní na Hepatitis B antigen, Hepatitis C Virus (HCV) a HIV1/HIV2 protilátky. Není však test, který by definitivně vyloučil infekčnost. Zacházejte s produkty se stejnou opatrností jako se vzorky pacientů.

Osobní ochrana

Při práci s tímto produktem nebo vzorky noste ochranné rukavice k zabránění expozice patogenním mikrobům.

První pomoc

Při zasažení pokožky, očí nebo úst tímto produktem nebo vzorky, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a použijte další příslušná opatření první pomoci. Vyhledejte lékaře.

Příprava

1. Vyjměte kalibrátor a speciální rozpouštědlo z lednice a nechte je přibližně deset minut stát při pokojové teplotě.
2. Napipetujte přesně 3 ml rozpouštědla do každé lahvičky s kalibrátorem a uzavřete víčkem.
3. Nechte lahvičky přibližně deset minut při pokojové teplotě, poté zlehka převracejte, abyste roztok pečlivě promísili bez vzniku bublinek, dokud není kalibrátor kompletně rozpuštěný.

Poznámka:

- Vykonávejte pečlivě, abyste zabránili vzniku bublinek při pipetování a míchání.
- Nepoužívejte produkt, jestliže je zakalený nebo kontaminovaný bakteriemi po rozpuštění.
- Uchovávejte produkt při teplotě mezi 2 °C a 8 °C po rozpuštění a spotřebujte během osmi hodin.

Skladování

2 °C až 8 °C

Testovací postup

Seznam součástí

- CALIBRATOR 80 Low (lyofilizát)
Přibližně 3 ml x 3 lahvičky
- CALIBRATOR 80 High (lyofilizát)
Přibližně 3 ml x 3 lahvičky
- CALIBRATOR 80 Diluent
10 ml x 3 lahvičky

Provozní postup

Důležité:

- Nepoužívejte tento produkt po uplynutí data expirace.

Pro detailní instrukce, viz operační manuál pro ADAMS A_{1C}.

Standardní hodnoty

Seznam standardních hodnot obsahuje následující dva druhy standardních hodnot. Před použitím se ujistěte, že kontrolujete příslušnou standardní hodnotu.

1. IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) vyhovující hodnota
2. NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) vyhovující hodnota.

Standardní hodnoty na seznamu mohou být pozměněny podle šarže produktu. Vždy zkontrolujte standardní hodnoty před použitím.

Omezení metody

Uchovávejte tento produkt při teplotě mezi 2 °C a 8 °C po rozpuštění a spotřebujte během 8 hodin.

	Teplota skladování
	Výrobce
	Biologicky nebezpečná látka
	Kód šarže
	<u>Expirace</u>
	Tento produkt odpovídá směrnici 98/79/EC.
	Autorizovaný zástupce pro Evropu
	Čtěte instrukce pro použití