

Příprava lyofilizovaného kontrolního materiálu



Neotevřená kontrola 2-8°C expirace 18 m ěsíců
od data výroby

Rekonstituovaná kontrola: 8 dní 2-8°C
 30 dní < -18 °C

1. Do lahvičky kontroly extendSURE napipetujte 250µl destilované vody
2. Za občasného krouživého pohybu s lahvičkou nechte přibližně 15 minut stabilizovat
3. Dbejte na jemné krouživé pohyby tak, aby se nedostala část roztoku na víčko lahvičky
4. Rozpipetujte alikvoty po 5 µl do zkumavek typu eppendorf a zamrazte na teplotu -18°C
5. Takto připravte vždy jenom jednu lahvičku. Ostatní připravte dle spotřeby

Příprava hemolyzovaného kontrolního materiálu

1. Vyndejte 5 µl alikvot z mrazáku
2. Ponechte chvíli v pokojové teplotě
3. Následně napipetujte 450 µl hemolyzačního promývacího roztoku 80H
4. Vzorek v kepu pipetou zamíchejte
5. Kepy vkládejte do sudých pozic kontrolního stojánku CTRL H dle příslušné identifikace na předchozí liché pozici nebo do stojánku určeného pro hemolyzované vzorky
6. Jako nosič pro eppendorfkou využijte Hitachi kep viz. obrázek níže



Při tomto postupu je jedna lahvička na přibližně 50 kontrolních měření.
Pro vytvoření hemolyzátu používejte zvlášť vyčleněný kanystr hemolyzačního promývacího roztoku 80H.