



Analyzátory moči série H

Calibration liquid for Specific gravity (kalibrátor specifické hmotnosti)

Příbalový leták

Název	Kalibrátor specifické hmotnosti pro analyzátory moči série H
Specifikace	8 ml/lahvička
Určení použití	Kalibrátor specifické hmotnosti série H se používá pro kalibraci specifické hmotnosti analyzátorů moči série H, a refraktometru hybridních analyzátorů moči série FUS a analyzátorů moči série MUS.
Princip	Specifická hmotnost je měřena za použití kalibrátoru a metodou na principu změny optické refrakce (případně refraktometrem).
Složení	Karbamid (3,6 % w/w), chlorid sodný (3,6 % w/w), chlorid draselný (1,2 % w/w), kreatinin (0,001 % w/w), žluť „Sunset yellow“ (0,08 % w/w), hydrazinová žluť (0,08 % w/w), další látky (91,44 % w/w).
Skladovací podmínky a stabilita	
	Skladujte pevně uzavřené při teplotě 2-8 °C na suchém tmavém místě. Stabilita je uvedena na štítku na lahvičce. Stabilita po otevření je 30 dnů při teplotě 2-8 °C.
Použití pro přístroj	Analyzátory moči série H, hybridní analyzátory moči série FUS a analyzátory moči série MUS
Postup	Viz uživatelský manuál příslušného analyzátoru moči
Vysvětlení výsledku	Po kalibraci refraktometru bude na obrazovce zobrazeno „calibration OK“ nebo „calibration not OK“. „Calibration OK“ znamená, že kalibrace proběhla úspěšně. „Calibration not OK“ znamená, že kalibrace selhala, opakujte kalibraci nebo vyčistěte refraktometr.

Varování a upozornění

1. Prosím, před použitím nechte produkt vytemperovat na pokojovou teplotu 18 – 25 ° a dobře jej promíchejte.
2. Uchovávejte produkt uzavřený v lednici při teplotě 2 – 8 °C.
3. Zabraňte kontaktu s pokožkou. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte pokožku vodou. V případě zasažení očí vyplachujte oči proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyvolejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.

Výkonnost produktu Správnost: SG = 1.040 ± 0.005

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 06/2019

Vysvětlení symbolů

	Prosím, čtěte uživatelský manuál		Skladujte při		Výrobce
	Stupeň nebezpečnosti		Číslo šarže		Stabilita do
	V souladu se směrnicí EU 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích <i>in vitro</i>				
	Autorizovaný zástupce		Katalogové číslo		



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

<http://www.dirui.com.cn>



Emergo Europe Molenstraat 15
2513 BH The Hague The Netherlands