



FE Focus B II

Příbalový leták

Název	FE Focus B II
Specifikace balení	1 x 20 ml, 1 x 22 ml, 1 x 25 ml, 1 x 60 ml, 1 x 125 ml
Určení použití	Tento produkt se používá pro vymezení správné pozice zaostření kamery před měřením na analyzátoch močového sedimentu, hybridních analyzátoch moči série FUS a systémech série MUS.
Princip testu	Princip zobrazení částic v usměrněném toku kapaliny.
Hlavní složka	Kontrolní krev: 2 500 částic/ μ l ~ 3 500 částic/ μ l

Poznámka: Přesné hodnoty koncentrace částic se liší podle různých šarží tohoto produktu (viz detaily na štítku).

Skladovací podmínky a stabilita

1. Tento produkt by měl být skladován nenačatý na tmavém místě při teplotě 2-8 °C. Stabilita/exspirace je uvedena na štítku.
2. Po otevření by měl být produkt skladován uzavřený a na tmavém místě při teplotě 2-8 °C, stabilita po otevření je 30 dnů.

Měřicí metoda Viz uživatelský manuál příslušného přístroje

Ukazatele výkonnosti

1. Správnost: celk. počet částic: 2 500 částic/ μ l ~ 3 500 částic/ μ l
2. Homogenita: CV $\leq$ 15,0 %

Upozornění

1. Tento produkt je určen pouze pro *in vitro* diagnostiku.
2. Před použitím promíchejte produkt po dobu 1 ~ 3 min důkladně, ale ne příliš prudce. Pokud není produkt řádně promíchán, počet měřených částic může být nižší, a tím bude ovlivněno zaostření kamery.
3. Zamražení produktu je zakázáno.
4. Abyste předešli nebo snížili příslušná rizika infekce, používejte při zacházení s produktem jednorázové rukavice a ochranné prostředky očí nebo obličeje.

Reference

1. Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662, 1983
2. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - Second Edition.

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 09/2018

Vysvětlení symbolů

	Prosím, čtěte uživatelský manuál		Skladujte při		Výrobce
	Stupeň nebezpečnosti		Číslo šarže		Stabilita do
	V souladu se směrnicí EU 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích <i>in vitro</i>				
	Autorizovaný zástupce		Uchovávejte na tmavých místech		



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

<http://www.dirui.com.cn>



Emergo Europe Molenstraat 15
2513 BH The Hague The Netherlands