

Sheath

Příbalový leták

Název	Systémový roztok Sheath pro analyzátor močového sedimentu
Specifikace	5 L/barel; 10 L/barel; 15 L/barel; 20 L/barel; 28 L/barel; 30 L/barel
Určení použití	Roztok používaný pro ředění vzorku, laminární proudění a počítání jednotlivých částic močového sedimentu
Princip testu	Princip zobrazení částic v usměrněném toku kapaliny
Složky	23 mmol/l Tris pufr, 0,6% chlorid sodný
Skladovací podmínky a stabilita	Skladujte pevně uzavřené při teplotě 2-30 °C na suchém tmavém místě. Stabilita je 18 měsíců bez otevření. Stabilita po otevření je 60 dnů.
Použití pro přístroj	Hybridní analyzátory moči série FUS a série MUS
Použití	Viz uživatelský manuál pro hybridní automatické analyzátory moči
Požadavky na vzorek	Vzorek čerstvé moči bez centrifugace
Ukazatel výkonnosti	pH má hodnotu cca $7,55 \pm 0,20$ při teplotě $(25 \pm 1) ^\circ\text{C}$

Důležité poznámky

1. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
2. V případě zasažení očí vyplachujte oči teplou vodou po dobu několika minut (zajistěte otevřené oči). Při výskytu bolesti nebo otoku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při potřísnění omyjte pokožku mýdlem a vodou.

Bibliografie

1. Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662, 1983
2. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - Second Edition.

Vysvětlení symbolů

	Prosím, čtěte uživatelský manuál		Skladujte při		Výrobce
	Stupeň nebezpečnosti		Číslo šarže		Stabilita do
	V souladu se směrnicí EU 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích <i>in vitro</i>				
	Autorizovaný zástupce		Katalogové číslo		

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 12/2018



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

<http://www.dirui.com.cn>



Emergo Europe Molenstraat 15
2513 BH The Hague The Netherlands